



Klaunenleim

Lagerung

Lagerung idealerweise bei Zimmertemperatur 21°C, nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Gebrauch

Bei kaltem Wetter: Leimtemperatur ca. 22°C

Bei heissem Wetter: Leimtemperatur ca. 18°C

Die Anpassung der Temperatur lässt genügend Zeit für die Anwendung und ermöglicht eine optimale Haftung.

Schritt 1 Die gesunde Klaue schneiden und die Oberfläche säubern und aufräuen.

Schritt 2 Die gesunde Klaue mit einem Heissluft-Föhn trocknen und wärmen.

Schritt 3 Den Kunststoff- oder Holzklotz für 15 Sek. anwärmen oder aus einer Wärmebox entnehmen.


Schritt 4 Mit dem Mixing Tip 30-50 ml Accu-bond auf den warmen Klotz auftragen.

Schritt 5 Den Klotz auf die vorbereitete Klaue positionieren, die Leimdicke zwischen Klotz und Klaue sollte 3-5 mm betragen. Draufhalten bis der Leim etwas trocknet und dann für 30 Sekunden fest andrücken. Wenn möglich den Accu-bond für 2-3 Minuten trocknen lassen bevor das Bein belastet wird.

Wir haben uns für eine dünne Kanüle entschieden damit möglichst wenig Leim verloren geht.

Es ist von Vorteil, wenn man vor Gebrauch an der Kanüle die Spitze mit dem Klauenmesser schneidet.

Die Kanüle bleibt dann auf der Tube bis zum nächsten Gebrauch.

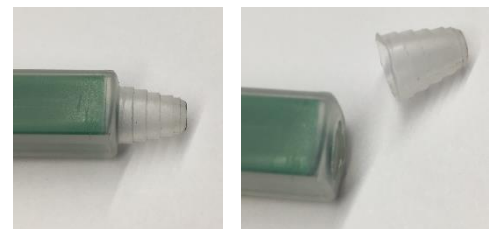

Sicherheitshinweise: Von Kindern fernhalten! Kein Haut- und Augenkontakt. Vermeiden Sie es die Dämpfe des Produktes einzusatmen. Bei Hautkontakt die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen. Benützen Sie eine Schutzbrille und angemessene Handschuhe, um Haut und Augen zu schützen. Falls das Produkt eingenommen wird, sofort medizinische Hilfe anfordern.

Anwendungs-Film unter <http://www.comforthoofcare.com/accu-bond/>